

## Operação >>>

1. Conecte o plugue à energia elétrica.
2. Ligue o aparelho (botão Power). O modo padrão é P1. A velocidade padrão é L3.
3. Pressione o botão Mode para alterar o modo entre os 5 modos disponíveis (P1, P2, P3, P4 e P5).
4. Pressione o botão Strength para ajustar a velocidade entre os 6 níveis de velocidade disponíveis (L1, L2, L3, L4, L5, L6).
5. No primeiro uso, inicie com uma velocidade menor de massagem e gradualmente aumente a velocidade após sua adaptação.
6. Para manter o massageador em melhores condições de uso, recomendamos não o utilizar por mais de 15 minutos a cada vez. O massageador será desligado automaticamente após 15 minutos de uso contínuo.
7. Após o uso, desligue o aparelho e desconecte da energia elétrica.
8. No primeiro uso, mão massageie a pele diretamente até concluir a adaptação.
9. A velocidade de massagem deve ser moderada, não tão rápida. Mova o aparelho para frente e para trás.

## Atenção >>>

- \* O aparelho não deve ser utilizado por gestantes, portadores de doenças cardíacas ou lesões físicas. Consulte um médico para orientações.
- \* Após as refeições, aguarde 1 hora para utilizar o aparelho.
- \* Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- \* Não use o aparelho na mesma área do corpo por mais de 15 minutos por vez.
- \* Não use o aparelho no banheiro ou em locais úmidos.
- \* Se o aparelho apresentar mau funcionamento, desligue-o imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.
- \* Não use o aparelho se estiver se sentindo indisposto(a) ou com mal estar.
- \* Desligue o aparelho para efetuar a substituição dos cabeçotes de massagem.
- \* Se o cabo de energia for danificado, solicite sua substituição no serviço de assistência técnica.

## Especificações do Produto >>>

Nome: Massageador Elétrico Portátil • Voltagem: 127V • Potência: 28W

## Manutenção e Armazenamento >>>

1. Limpe o aparelho somente com um pano macio e detergente neutro.
2. Não utilize água ou líquidos no aparelho.
3. Guarde o aparelho em local fresco e seco. Evite altas temperaturas, exposição aos raios solares e gases corrosivos.
4. Sempre desconecte o aparelho da energia elétrica se não estiver em uso.

## Garantia >>>

1. Este produto está garantido pelo período de **1 ano** a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar o cupom fiscal. A falta do cupom fiscal extingue automaticamente a garantia.
2. Só estão cobertos pela garantia defeitos de fabricação. Defeitos provocados mesmo que não intencionalmente, não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia só cobre o funcionamento do aparelho, excluindo-se a braçadeira que se manuseada indevidamente, poderá estourar, furar, etc.
4. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.
5. A garantia é válida somente nos países onde o aparelho é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado oficialmente pelo fabricante.
6. A garantia é válida somente ao primeiro consumidor e ela é intransferível, sendo nula qualquer outra condição.
7. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

8. A verificação periódica do aparelho não está coberta pela garantia
9. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas ao território nacional (Brasil).
10. Perde a garantia o aparelho que for usado indevidamente, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, umidade, etc. Defeitos ou danos causados por uso inadequado estão excluídos desta garantia.
11. A Assistência Técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para Assistência via Correio. O Sedex de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho pela mesma via com frete pago pela Techline.

MODELO: MS-POWER MARCA: TECHLINE  
GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA  
IMPORTADO POR: TECHLINE COM. IMP. EXP. SERV. LTDA.  
END.: AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 1.765 - SETOR A, PORTAL DE JACARAÍPE - SERRA - ES  
CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 CNPJ FILIAL: 64.132.434/0007-13  
PAÍS DE ORIGEM: CHINA

PRODUTO NÃO PERECÍVEL | VALIDADE INDETERMINADA.

ATENÇÃO: PRODUTO SEM FINS TERAPÊUTICOS, NÃO SUJEITO A CADASTRO NA ANVISA. CASO POSSUA ALGUMA CONDIÇÃO MÉDICA, CONSULTE SEU MÉDICO ANTES DE UTILIZÁ-LO. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO. ARMAZENE EM LOCAL SECO E FRESCO, LONGE DO CALOR E DA UMIDADE. RETIRE O EQUIPAMENTO DA TOMADA. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

techline®

SAC Cidade de São Paulo: 11 3914-8600  
Outras localidades: 0800 555 7510



touching your life  
every day

Manual de Uso

techline®  
MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL  
MS-POWER



A maneira mais fácil  
de se exercitar e relaxar!


A nova geração apresenta inovação, design leve e a potência de um massageador eficiente que relaxa sua musculatura.

O massageador é adequado para utilização na cintura, ombros, braços, glúteos, coxas, panturrilhas, abdômen etc. O movimento do massageador relaxa a musculatura das partes do corpo.

Antes do uso do produto, leia esta seção para sua utilização correta e segura. Aqui são apresentadas indicações de uso correto para evitar riscos e danos. Após a leitura, guarde este manual em local seguro para consulta posterior.



## Componentes e Funções >>>

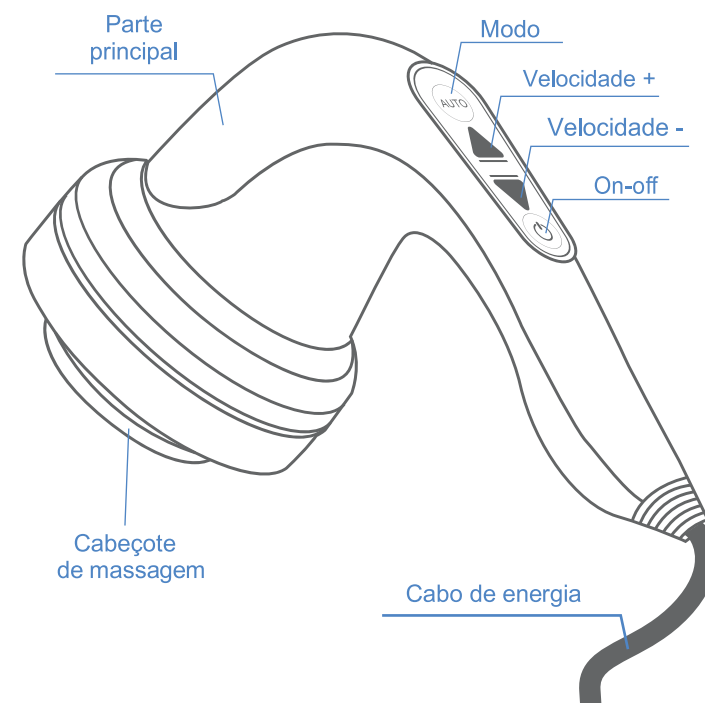

## Acessórios do massageador >>>




(O cabeçote de massagem é configurado com um pacote real de amostras)


## Uso dos acessórios do massageador >>>

1. Cabeçote liso: massagem de decompressão, massagem facial e abdominal.
2. Cabeçote ondulado: pontos de acupuntura e massagem profunda na pele.
3. Cabeçote esfoliador: remoção de calos e pele seca dos pés. Obs.: não coloque a tampa de rede no massageador com este cabeçote acoplado.
4. Tampa de rede: evita o enroscamento de pelos no aparelho, protege os pelos.


## Instruções de uso >>>

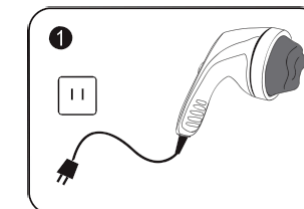


Desconecte o cabo de energia elétrica antes de substituir o cabeçote.

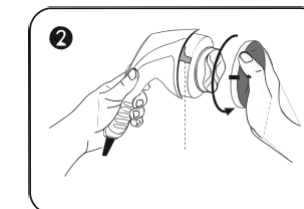


Gire a tampa de rede para destravar e puxe para retirar. Para acoplar, alinhe a tampa e deslize sobre o cabeçote. Gire para travar.

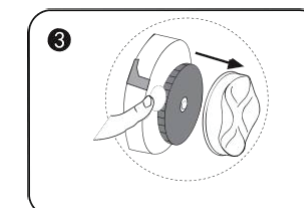


Remova a tampa de segurança seguindo as instruções acima. Retire o cabeçote suavemente do corpo principal, evitando girar ou inclinar.

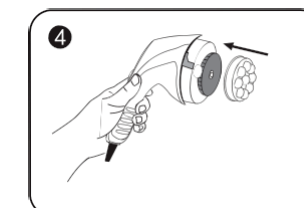

Após deslizar completamente do disco central, substitua com o cabeçote desejado deslizando o cabeçote no disco central.

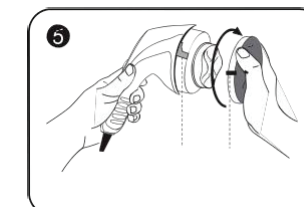

Substitua a tampa de segurança

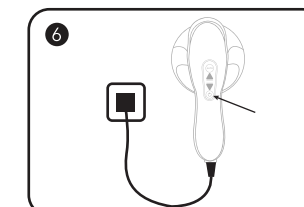

Conecte o cabo de energia elétrica e ligue o aparelho.