



DISTRIBUIDOR NO BRASIL

Techline Comercial Importadora Exportadora e Serviços Ltda.

CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 | CNPJ FILIAL: 64.132.434/0007-13

End.: Rodovia Governador Mario Covas, S/N, Km 9,5 – Sala 70

Bairro Primavera – Viana – ES – Cep: 29135-160

FABRICANTE: SHENZHEN BI-RICH MEDICAL DEVICES CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

END. FAB.: The 1st Building of No. 10, Xinqiao GangZai Road, Xinqiao Street, Bao'An District,

518125, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

techline®



Cidade de São Paulo: 011 3478-1620
Outras localidades: 0800 555 7510

techline®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INALADOR / NEBULIZADOR

PNEUMÁTICO

NB-01



TAMPA
REMOVÍVEL



ATUA DIRETAMENTE
NOS PULMÕES



INALAÇÃO COM
INCLINAÇÃO DE
ATÉ 45°



MÁSCARA ADULTO
E INFANTIL



COM REGULAGEM
DE FLUXO



Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar o Inalador/Nebulizador. O material refere-se ao item atual e caso sofra qualquer atualização, esta não será especificamente apontada.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

Este produto precisa de precauções especiais em relação a EMC e deve ser instalado e colocado em utilização de acordo com a informação de EMC fornecida, este Nebulizador pode ser afetado por equipamentos de comunicação portáteis e móveis RF.

- 1. *Não use telefones móveis, ou outros dispositivos que emitem campos eletromagnéticos, perto do Nebulizador.
- 2. *Cuidado: Este Nebulizador foi cuidadosamente testado e inspecionado para garantir o desempenho e operação adequados!
- 3. *Cuidado: Este Nebulizador não deve ser usado como adjacente ou empilhado a outro equipamento.

DECLARAÇÃO – EMISSÃO ELETROMAGNÉTICA	
Teste de emissões	Conformidade
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1
Emissões RF CISPR 11	Classe B
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A
Oscilações de voltagem/ Emissões de oscilações IEC 61000-3-3	Conformidade

DECLARAÇÃO – EMISSÃO ELETROMAGNÉTICA		
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade
RF conduzida IEC 61000-4-6	3 V 0.15 MHz a 80 MHz 6 V em bandas ISM e amadoras entre 0.15 MHz e 80 MHz	3 V 0.15 MHz a 80 MHz 6 V em bandas ISM e amadoras entre 0.15 MHz e 80 MHz
RF radiada IEC 61000-4-3	10V/m 80 MHz a 2.7 GHz	10V/m

DECLARAÇÃO – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA		
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contato ±8 kV ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar	Contato ±8 kV ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar
Disparo/transitório elétrico rápido IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de suprimento de energia	± 2 kV para linhas de suprimento de energia
Aumento IEC 61000-4-5	± 0.5kV, ± 1 kV linha(s) a linhas	± 0.5kV, ± 1 kV linha(s) a linhas
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão em linhas de entrada de suprimento de energia IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos	0 % UT; 0.5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°e 315° 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 ciclo Monofásico: a 0° 0 % UT; 250/300 ciclos
Frequência de energia (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
NOTA: UT é a tensão de rede a.c. antes da aplicação do teste.		

DECLARAÇÃO - IMUNIDADE A CAMPOS DE PROXIMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE RF SEM FIO					
Teste de imunidade	Nível de teste IEC60601				Nível de conformidade
	Frequência de teste	Modulação	Energia máxima	Nível de imunidade	
RF radiada IEC 61000-4-3	385 MHz	**Modulação de Pulso: 18Hz	1.8W	27 V/m	27 V/m
	450 MHz	Variação *FM+ 5Hz: 1kHz senoidal	2 W	28 V/m	28 V/m
	710 MHz 745 MHz 780 MHz	**Modulação de Pulso: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m
	810 MHz 870 MHz 930 MHz	**Modulação de Pulso: 18Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	1720 MHz 1845 MHz 1970 MHz	**Modulação de Pulso: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	2450 MHz	**Modulação de Pulso: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	5240 MHz 5500 MHz 5785 MHz	**Modulação de Pulso: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m
Nota* - Como alternativa a modulação FM, 50% de modulação de pulso a 18 Hz pode ser usada porque, ao passo que isto não representa a modulação real, seria o pior caso. Nota** - O condutor deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada com um ciclo de trabalho de 50%.					

SIMBOLOS IEC

Atenção ! Consulte os documentos acompanhantes_____

Parte aplicada de tipo BF_____

Corrente Alternada_____

Aparelho Classe II_____

Somente para Uso Doméstico_____



RESSALVAS IMPORTANTES



ATENÇÃO:

- 1.Siga as instruções de seu médico para usar o aparelho.
- 2. Não utilize medicamentos que não sejam prescritos por um médico e não altere as dosagens de medicamentos por conta própria. Este produto pode ser usado com soluções simples para crianças.
- 3. Siga as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Nebulizador de qualquer outra forma, que não descrita neste manual, sob risco de acidentes e de perda da garantia.
- 4.Não coloque mais do que 6ml de solução no nebulizador.



AVISO: PARA REDUZIR RISCOS DE ACIDENTES

- 1. Risco de choque elétrico— não remova o gabinete.
- 2. Desconecte o cabo da tomada antes de limpar ou fazer manutenção.
- 3. Não coloque o equipamento próximo a objetos quentes, fiseando ou queimando.
- 4. Não use óleo ou graxa no aparelho ou próximo a ele.
- 5. Desligue o Nebulizador quando não estiver sendo utilizado.
- 6. Mantenha o cabo longe de superfícies com altas temperaturas.
- 7. NUNCA deixe cair nem insira algum objeto em qualquer abertura.
- 8. NUNCA bloqueie as entradas de ar do Nebulizador nem o coloque em uma superfície macia, como cama ou sofá, onde as entradas de ar podem ser bloqueadas.
- 9. Evite usá-lo em lugares molhados ou úmidos.
- 10. Desligue o nebulizador antes de encher o tubo nebulizador.
- 11. Quando utilizar o produto próximo a TV, forno micro-ondas, celulares ou outros aparelhos que possam emitir um campo elétrico forte, o Nebulizador pode ser afetado, deixe o nebulizador distante destes aparelhos quando for utiliza-lo.

INTRODUÇÃO

Este Nebulizador compressor foi desenvolvido para direcionar a solução de medicamento prescrita. O Nebulizador converte o medicamento em uma névoa aerossol que é inalada pelo usuário através do bocal ou máscaras.

Leia o manual cuidadosamente antes de usar o nebulizador e guarde-o para consultas futuras.

ESPECIFICAÇÃO

REQUERIMENTOS ELÉTRICOS	127V/60Hz, ou 220 V / 60Hz
CONSUMO DE ENERGIA	Abaixo de 65W ou 60W
CORRENTE NOMINAL	Abaixo de 1.5A ou 0.70A
DIMENSÕES	Comprimento 155mm x Largura 140mm x Altura 95mm
PESO	1.2kg(2.64lbs)
RÚIDO SONORO	55 a 63 dB(A)
MAXIMA PRESSÃO DE COMPRESSÃO	35 Psi a 50psi (241 kpa to 345 kpa)
MAXIMA PRESSÃO DE OPERAÇÃO DO NEBULIZADOR	9~16Psi (62kpa to 110kpa)
VARIAÇÃO DO FLUXO POR LITRO	5-7 L/Min
NÍVEL DE NEBULIZAÇÃO	≥0.25 ml / Min
TAMANHO DA PARTÍCULA	3 microns
CAPACIDADE MÁXIMA DE SOLUÇÃO DO NEBULIZADOR	6ml
VOLUME MÁXIMO DE REMÉDIO RESIDUAL	0.5 ml
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	+10°C°C a +40°C°C
HUMIDADE DE OPERAÇÃO	30% a 85%
FAIXA DE TEMPERATURA DO ARMAZEM/TRANSPORTE	-20°C°C°C a +70°C°C°C
UMIDADE ARMAZEM/TRANSPORTE	10% a 95%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO DE ARMAZEM/TRANSPORTE	700mb a 1,060mb
TEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMENTO	20 minutos
INTERVALO DE USO	40 minutos

Proteção contra risco elétrico

 - Classificado como Tipo II

 - Partes aplicadas tipo BF:

Modo de operação—Manual.

IP21—Protegido contra gotas que caiam na vertical, proteção contra objetos sólidos com 12,5 de diâmetro ou mais.

DESCRIÇÃO

- | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Conector de saída de ar | 5. Fio de energia | 9. Máscara pediátrica |
| 2.Tampa do Filtro | 6. Nebulizador | 10. Copo nebulizador |
| 3. Interruptor | 7. Tubo de ar | 11. Bico nebulizador |
| 4. Entrada de ar | 8. Máscara adulto | 12. Filtro de ar |



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Coloque o Nebulizador em uma superfície estável, firme e plana para que a unidade possa ser facilmente alcançada enquanto estiver sentado.
2. Puxe para fora o cabo de energia da base do Nebulizador e certifique-se que a unidade está desligada.
3. Ligue o cabo de energia em uma tomada.
4. Conecte o tubo de ar do Nebulizador no conector de saída de ar.
5. Adicione a solução no copo nebulizador através da abertura na tampa, usando um conta-gotas ou uma dose já medida.

A marca “6cc” no copo nebulizador e o nível máximo.

A Solução não pode passar do nível máximo.

6. Conecte o bocal ou uma máscara no copo nebulizador.
7. Ligue o Nebulizador, pressionando o interruptor para “on”.
8. Inicie a utilização ao colocar o bocal entre os dentes. Inale através do bocal ou utilize uma das máscaras.

LIMPEZA

1. Desligue o interruptor e tire o aparelho da tomada.
2. Remova a tubulação da entrada de ar.
3. PARA LIMPAR: Desmonte o bocal, a tampa do nebulizador, a câmara e defletor, e lave estes itens em água quente com detergente neutro.
Enxague os itens cuidadosamente para remover todo detergente e deixe secar.
4. PARA DESINFETAR: Misture uma parte de vinagre branco com três partes de água quente em uma vasilha limpa. Submerja o bocal, tampa do nebulizador, câmara e defletor por meia hora na solução. Retirar da solução e deixar secar.
5. Não há necessidade de limpar a tubulação. Se necessário limpe a superfície regularmente.

MANUTENÇÃO

1. O filtro de ar deve ser substituído quando ficar cinza.
 2. Apenas pessoal autorizado devem fazer reparos neste produto.
- CUIDADO: O nebulizador pode ser danificado se usado com um filtro sujo ou se o filtro for substituído por outro material. NÃO use o aparelho sem o filtro.

GARANTIA

1. Este produto está garantido pelo período de dois anos a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar o cupom fiscal.
2. Só estão cobertos pela garantia defeitos de fabricação. Defeitos provocados pelo usuário, mesmo que não intencionalmente, não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia só cobre o funcionamento do aparelho.
4. Não estão cobertos pela garantia defeitos provocados por queda do nebulizador, consertos executados por pessoa não autorizada pelo fabricante, violação e abertura

do nebulizador pelo próprio consumidor ou por pessoa não autorizada pelo fabricante ou falta da apresentação do cupom fiscal de compra.

5. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.
6. A garantia é válida somente nos países onde o aparelho é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado oficialmente pelo fabricante.
7. A garantia é válida somente ao primeiro consumidor e ela é intransferível, sendo nula qualquer outra condição.
8. O fabricante se obriga a consertar o produto no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
9. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse julgamento é feito sob critério do fabricante.
10. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo de garantia.
11. Após o prazo de garantia o fabricante se obriga a manter peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo usuário.
12. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças pelo uso indevido, mesmo que o aparelho esteja dentro do período de garantia, será cobrado à parte.
13. A garantia e o serviço de assistência técnica estão limitadas ao território nacional (Brasil).
14. Perde a garantia o aparelho que for usado indevidamente, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, mau uso etc.

DADOS TÉCNICOS

Tamanho da Partícula: **MMAD * aproximadamente 3 µm


Quantidades de Medicamento Apropriadas: 2ml mínimo - 6ml máximo

Taxa de Nebulização: 0.33ml/min (por perda de peso)

Saída Aerossol: **0.33 ml (2ml, 1% NaF)
Taxa de Saída Aerossol: **0.06ml/min (2ml, 1% NaF)

Nebulizador compressor Techline, a curva de distribuição de tamanho de partícula também:

Resultado do impacto em cascata **medidas para tamanho de partículas com Nebulizador Compressor Techline e kit do nebulizador.

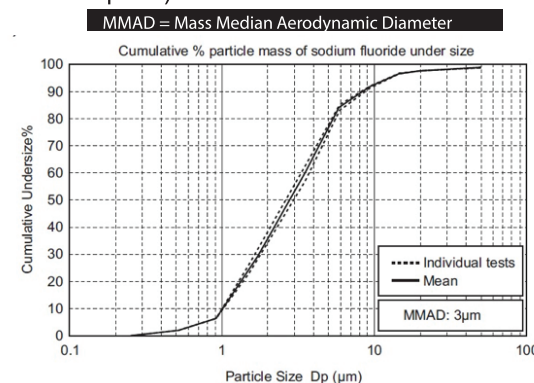

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

Este produto precisa de precauções especiais em relação a EMC e deve ser instalado e colocado em utilização de acordo com a informação de EMC fornecida, este Nebulizador pode ser afetado por equipamentos de comunicação portáteis e móveis RF.

1. *Não use telefones móveis, ou outros dispositivos que emitem campos eletromagnéticos, perto do Nebulizador.
2. *Cuidado: Este Nebulizador foi cuidadosamente testado e inspecionado para garantir o desempenho e operação adequados!
3. *Cuidado: Este Nebulizador não deve ser usado como adjacente ou empilhado a outro equipamento.

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE- EMISSÃO ELETROMAGNÉTICA		
Este Nebulizador é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário deve certificar-se da utilização nos seguintes ambientes.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético- orientação
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	Este aparelho usa energia RF apenas para sua função interna. Por essa razão, suas emissões RF são muito baixas e não causam qualquer interferência nos aparelhos eletrônicos que estejam próximos.
Emissões RF CISPR 11	Classe B	São adequados para uso em todos os estabelecimentos, incluindo o doméstico e aqueles diretamente ligados à rede de fornecimento de energia pública que forneça instalações usadas com propósitos domésticos.
Emissões Harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de tensão / emissões oscilantes IEC 61000-3-3	Cumpr	

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA			
Este é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário deve certificar-se da utilização nos seguintes ambientes.			
Teste de Imunidade	IEC 60601 nível de teste	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - orientação
Descarga Eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contato ±8 kV ar	±6 kV contato ±8 kV ar	Pisos devem ser de madeira, concreto ou piso de cerâmica. Se o chão for coberto por material sintético, a umidade relativa deve ser de no mínimo 30%.

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA (CONTINUAÇÃO)			
Este aparelho é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário deve certificar-se da utilização nos seguintes ambientes.			
Teste de Imunidade	IEC 60601 nível de teste	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - orientação
Emissões RF Velocidade elétrica transitória/explosiva IEC 61000-4-4	±2 kV para linhas de alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	±2kV para linhas de alimentação	A intensidade da corrente elétrica deve ser de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Onda IEC 61000-4-5	± 1 kV linha(s)- linha(s) ± 2 kV linha(s)- terra	±1 kV modo diferencial	A intensidade da corrente elétrica deve ser de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de alimentação IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% de queda em U _T) para 0,5 ciclo 40% U _T (60% de queda em U _T) para 5 ciclos 70% U _T (30% de queda em U _T) para 25 ciclos <5% U _T (>95% de queda em U _T) Para 5 seg	<5% U _T (>95% de queda em U _T) para 0,5 ciclo 40% U _T (60% de queda em U _T) para 5 ciclos 70% U _T (30% de queda em U _T) para 25 ciclos <5% U _T (>95% de queda em U _T) Para 5 seg	A intensidade da corrente elétrica deve ser de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do nebulizador requer um funcionamento contínuo durante as interrupções de energia, é recomendado que o nebulizador seja conectado em uma fonte de energia ou bateria que não seja interrompida.
Frequência de energia (50Hz/60Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Frequência de energia e campos magnéticos devem estar em níveis de ambiente hospitalar ou comercial típico.
NOTE U _T é a voltagem principal c.a. anterior à aplicação do nível de teste.			

ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA			
Este aparelho é destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário deve certificar-se da utilização nos seguintes ambientes.			
Teste de Imunidade	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados próximo de qualquer parte do nebulizador, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3\sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2,5 \text{ GHz}$ Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As forças de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por um estudo eletromagnético do local, a devem ser inferiores ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência. b Podem ocorrer interferências nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 
RF Irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	3 V/m	

NOTA 1 A 80MHz e 800 MHz, se aplica a variação mais alta.
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações.
Propagação eletromagnética P é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
(a) As forças de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para rádio (celular / sem fio) e terras rádios móveis, rádio amador, AM e FM transmissão de rádio e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma SiteSurvey eletromagnética deve ser considerada. Se a força do campo medida no local em que o nebulizador é usado excede o nível de conformidade RF aplicável acima, o nebulizador deve ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou re - posicionamento do nebulizador
(b) Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser inferiores a 3 V / m.

SEPARAÇÃO RECOMENDADA DE DISTÂNCIAS ENTRE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES RF PORTÁTIL E MÓVEL E O NEBULIZADOR.			
Este aparelho é destinado para utilização em um ambiente eletromagnético em que as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos portáteis e móveis de comunicação de RF (transmissores) e o nebulizador como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.			
Potência nominal máxima de saída do transmissor (W)	Distancia de separação de acordo com o transmissor de frequência (m)		
	150 KHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Para transmissores com uma potência de saída máxima não listados acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.			
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, se aplica a distância de separação para a maior gama de frequência.			
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verifique os pontos abaixo se a sua unidade falhar durante a operação. Você também pode consultar as páginas deste manual para mais instruções.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	O QUE FAZER
Nada acontece quando ligo o aparelho no botão	O cabo de energia elétrica está conectado na tomada?	Verifique se o cabo de energia elétrica está devidamente ligado na tomada. Se for preciso, retire da tomada e coloque novamente.
Sem nebulização ou pouca nebulização quando o aparelho está ligado.	A medicação foi colocada no compartimento?	Colocar a quantidade correta da medicação no compartimento
	Há falta de medicação ou medicação em excesso no compartimento?	
	Existe alguma peça faltando ou desencaixada?	Complete com as peças faltantes ou encaixe corretamente.
	A máscara ou bocal estão encaixados corretamente?	Encaixe a máscara ou o bocal corretamente.
	Existe algum bloqueio no tubo?	Verifique se não há nada bloqueando a saída de ar pelo tubo.
	O tubo está conectado corretamente?	Verifique se o compartimento não está inclinado a um ângulo maior que 45 graus.
	O tubo está dobrado ou danificado?	Verifique se o tubo está devidamente conectado ao aparelho e a máscara/bocal
	O filtro de ar está sujo?	Verifique se o tubo não está dobrado ou danificado.
	A tampa do filtro de ar está colocada corretamente?	Troque o filtro de ar por um novo.
	O aparelho está sendo usado constantemente por mais de 20 minutos?	Verifique se a tampa do filtro de ar está colocada corretamente.
O aparelho está muito quente.	O aparelho está sendo usado constantemente por mais de 20 minutos?	O limite de uso constante do aparelho é de 20 minutos. Depois disso ele deve ficar desligado por 40 minutos antes de reiniciar o uso.

NOTA: Se a solução sugerida não resolver o problema, não tente consertar o Nebulizador - nenhuma parte do Nebulizador pode ser aberta pelo usuário.

Caso nenhuma das soluções resolva o problema, entre em contato com o SAC da Techline.



Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

Esta marca indicada no produto ou em seu manual, indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram este produto ou com o escritório do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem levar esse item para reciclagem ambientalmente segura. Este produto não contém substâncias perigosas.