

MODELO: NB-200 MARCA: TECHLINE  
2 ANOS DE GARANTIA PARA O APARELHO  
IMPORTADO POR: TECHLINE COM.IMP. EXP. SERV. LTDA.  
AV CIVIT I, 1295, GALPÃO B, SETOR C2 - BARRO  
BRANCO, SERRA - ES - CEP 29170-740  
CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 CNPJ FILIAL: 64.132.434/0007-13  
AFE MATRIZ: 1.04.106-1 AFE FILIAL: 8.13.267-6 (35X32MHM94W7)  
CADASTRO ANVISA: 10410619017  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALDEMAR ALBERT SARACENI  
CREA/SP: 5060960387/D  
FABRICANTE: SHENZHEN FITCONN TECHNOLOGY CO.,LTD  
END. FAB.: 7TH FLOOR,NO.116, XIANGGSHAN ROAD,LUOTIAN  
COMMUNITY,SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY  
GUANGDONG PROVINCE, CHINA PAÍS DE ORIGEM: CHINA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

**techline®**



Cidade de São Paulo:  
**11 3478-1620**  
Outras localidades:  
**0800 555 7510**

# techline®

## INALADOR/NEBULIZADOR COMPRESSOR **NB-200**

### Manual de Instruções

Modelo: **NB-200.2024**



Muito obrigado por adquirir este nebulizador. Para sua segurança e uso correto, leia este Manual de Instruções antes de utilizar o produto.

## Manutenção

### USO

Este produto é um equipamento clínico. Siga a orientação de um médico e utilize o equipamento corretamente.

As características de nebulização deste equipamento diferem pelas propriedades da medicação. Em especial, com o uso de medicações contendo alta atividade na superfície ou viscosidade, como agentes de solubilização de medicação ou expectorantes, a taxa de nebulização poderá ser reduzida. A taxa de nebulização também poderá ser reduzida quando a temperatura da medicação estiver baixa.

Não use o equipamento se estiver danificado de alguma forma. O uso contínuo de um equipamento danificado poderá causar lesões, resultados inadequados ou sérios riscos.

Se o equipamento não estiver em uso, armazene em local seco e proteja-o contra umidade extrema, calor, fiação e ação direta de luz solar. Não coloque objetos pesados sobre a embalagem.

Se o equipamento for usado em crianças e pessoas incapacitadas ou com crianças e pessoas incapacitadas nas proximidades, supervisione atentamente a operação do equipamento.

Não é permitido efetuar modificações neste equipamento.

A máscara de inalação é recomendada quando o equipamento for utilizado por crianças com idade inferior a 5 anos. Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças. O bocal ou outras peças pequenas podem ser engolidas.

O equipamento poderá apresentar um som metálico. Isto não representa mau funcionamento.

O equipamento deve ser desconectado da rede elétrica após o uso.

Mantenha a máscara de inalação e o bocal limpos. Estas peças têm contato direto com o usuário.

### ARMAZENAGEM

NÃO guarde o equipamento em locais com exposição a altas temperaturas (acima de 60 °C), baixas temperaturas (abaixo de 20 °C), alta umidade relativa (acima de 95%) ou quantidades excessivas de poeira. Nunca coloque objetos pesados sobre a embalagem.

Guarde o equipamento em local limpo e seguro. Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

### MANUTENÇÃO

NÃO derrube ou exponha o equipamento a impactos ou vibrações.

Nunca seque as peças do equipamento em fornos de micro-ondas.

Observe que somente o bocal pode ser fervido para esterilização.

Não transporte ou guarde o equipamento com resíduos líquidos no copo de medicação.

## Apresentação do Produto

Este produto é destinado ao tratamento de doenças respiratórias como asma, alergias etc.

Princípio funcional: o compressor impulsiona ar ao nebulizador. Quando ingressa no nebulizador, o ar converte a medicação prescrita em uma névoa de gotículas microscópicas que podem ser facilmente inaladas.

Os símbolos utilizados neste manual são apresentados abaixo.

| SÍMBOLOS      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÍMBOLOS      | SIGNIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | O símbolo de "cuidado". Este é um símbolo de segurança utilizado para destacar que há precauções ou avisos específicos associados com os equipamentos e que não são encontrados na etiqueta. O símbolo também pode ser utilizado para significar "atenção, consulte as instruções de uso". |
|               | Fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | O símbolo significa que o equipamento deve ser enviado/coletado e descartado por órgãos específicos em conformidade com as regulamentações locais sobre coleta separada após a vida útil do produto.                                                                                       |
|               | O símbolo "O GUIA DE OPERAÇÃO DEVE SER LIDO" indica ao usuário a necessidade de consulta às instruções de uso.                                                                                                                                                                             |
|               | Este símbolo indica que o equipamento inclui a Norma EC 60601-1 Type BF Applied Part                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IP21</b>   | Proteção contra entrada de água. Isto significa que o equipamento está protegido contra entrada vertical de água a 15°.                                                                                                                                                                    |
|               | Indica a data de fabricação do equipamento clínico.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SN</b>     | Este símbolo deve ser acompanhado pelo número de série do fabricante.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LOT</b>    | Este símbolo indica o número do lote. Indica o código do lote para identificação ou rastreio do lote.                                                                                                                                                                                      |
| <b>EC REP</b> | Indica o Representante Autorizado na Comunidade Europeia.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CE</b>     | Este é o selo CE Mark. Este símbolo certifica que um produto atende os requisitos de segurança do consumidor, saúde ou meio ambiente da União Europeia.                                                                                                                                    |

### 3. Inale a medicação conforme orientação médica

Acessórios de inalação:

#### Bocal

- Insira o acessório na boca. Inale a medicação e exale normalmente pelo bocal.



#### Máscara

- Coloque a máscara sobre o nariz e boca. Puxe o elástico para trás da cabeça. Ajeite suavemente o elástico na cabeça para prender a máscara ao rosto com segurança. Inale a medicação normalmente.




#### Acessório nasal (opcional)

- Inale a medicação com a utilização do acessório nasal conforme a figura. Exale pela boca.




### 4. Desligar

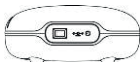

Pressione o botão "Liga/Desliga" por 0,5 segundo. Ao desligar o compressor, a nebulização é interrompida.

### 3. Copo de Medicação

A. Rosqueie a concha superior do nebulizador na concha inferior em sentido horário até fechar com segurança.

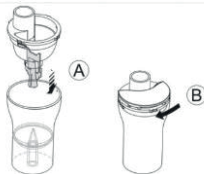

B. Monte os acessórios de inalação desejados.



Monte o bocal



Monte a máscara

## Especificações

|                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                                    | Nebulizador Compressor                                                                   |
| Modelo                                                     | NB-200                                                                                   |
| Componentes                                                | Nebulizador, tubo de ar, máscara adulta, máscara infantil, bocal e filtros (5)           |
| Fonte de energia                                           | AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz                                                                |
| Pressão nebulizador                                        | 40KPa-80KPa                                                                              |
| Ambiente de operação                                       | Temperatura: 10 a 40 °C<br>Umidade: 30 a 80% UR<br>Pressão Atmosférica: 70.0KPa~106.0KPa |
| Armazenamento                                              | Temperatura: -20 a 60°C<br>Umidade: 10 a 95% UR<br>Pressão Atmosférica: 70.0KPa~106.0KPa |
| Tipo (componentes/subconjuntos/sistema)                    | Equipamento                                                                              |
| Consumo de energia                                         | Adaptador I/P: 100-240V.50 60Hz.0.6A MÁX. O/P: 12V DC, 1A                                |
| Nível de ruído                                             | ≤ 50dB(A)                                                                                |
| Capacidade copo                                            | 8ml                                                                                      |
| Taxa de nebulização                                        | ≥ 0.2mL/min                                                                              |
| Tamanho da partícula                                       | MMADs: 3.5µm ±25%                                                                        |
| Dimensões                                                  | 157x98x96mm                                                                              |
| Peso                                                       | Aproximadamente 250g                                                                     |
| Proteção contra ingresso prejudicial de água ou partículas | IP21                                                                                     |

- A taxa de nebulização é reduzida a baixas temperaturas.

- As especificações e aparência podem ser alteradas para melhorias sem aviso prévio.

Limite o uso a 30 minutos por vez e faça um intervalo de 20 minutos antes de novo uso.

## Segurança

Leia as notas de segurança antes do uso do equipamento

Os símbolos de advertência e os ícones são indicados para o uso seguro e correto do equipamento, além de evitar riscos e danos pessoais. Os ícones e significados são apresentados a seguir.



- Sobre o tipo, a dosagem e a posologia da medicação, um médico deverá ser consultado.
- Limpe e desinfete o equipamento, o copo de medicação, a máscara de inalação, o bocal e o acessório nasal (opcional) ao usá-los pela primeira vez, após cada inalação e após um longo período sem uso.
- O paciente deve ser o operador pretendido do equipamento.
- Não efetue manutenção no equipamento durante a operação.
- Seque prontamente as peças limpas e armazene em local seco.
- Não coloque ou efetue a secagem do nebulizador, componentes e peças em forno de micro-ondas.
- Mantenha o equipamento, suas peças e componentes fora do alcance de crianças. O equipamento contém peças pequenas que podem ser engolidas. Cabos e mangueiras podem causar estrangulamentos.
- Não utilize acessórios como copo de medicação, máscaras, bocal e acessório nasal de fabricantes não descritos neste manual.
- Não lave a unidade principal e o plugue de energia com água ou água quente.
- Não submerja o equipamento em água ou outros líquidos.
- Não cubra o compressor com cobertores, toalhas ou qualquer tipo de cobertura. Isso poderá causar o mau funcionamento e o superaquecimento do equipamento.
- Não utilize o equipamento próximo ou exposto a gases ou vapores inflamáveis.
- A Pentamidina não é uma medicação aprovada para utilização neste equipamento.
- Sempre descarte o resíduo e a medicação restante no copo de medicação após o uso deste equipamento.
- Não posicione ou deixe o equipamento próximo da exposição a altas temperaturas ou alterações de umidade, como o interior de veículos em dias e épocas de forte calor ou à luz direta do sol.
- Não utilize ou armazene o equipamento próximo de gases nocivos ou substâncias voláteis.
- Limpe o copo de medicação antes do uso.
- Não use o equipamento sob circuitos de respiração mecânica ou anestésicos.
- O equipamento não é adequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nítrico.

- Risco de choques elétricos:  
Não utilize o compressor (unidade principal) e o plugue de energia se estiverem molhados ou úmidos.  
Não conecte ou desconecte o plugue de energia com mãos molhadas ou úmidas.  
Não use ou armazene o equipamento em locais úmidos, como o banheiro. Utilize o equipamento dentro da temperatura e umidade especificadas.  
Não utilize o equipamento com cabo ou plugue de energia danificados.

- Manutenção e armazenagem:  
Não deixe resíduos de desinfetantes nas peças do nebulizador. Enxague as peças do nebulizador com água corrente após a limpeza.  
Armazene o equipamento e seus componentes em local limpo, seco e seguro.

Em caso de dúvidas sobre a montagem, operação ou manutenção deste equipamento, entre em contato com o serviço de assistência técnica local. Não abra, desmonte ou efetue a manutenção do equipamento por conta própria.

## Limpeza do Equipamento Após o Uso



Limpe e armazene a unidade após o uso.

1. Remova o acessório de inalação do copo de medicação.
2. Retire o tubo de ar do copo de medicação.
3. Desrosqueie suavemente a concha superior do copo de medicação.



4. Descarte a medicação residual.




5. Lave as peças com água em abundância.
6. Seque as peças manualmente ou com ventilação com um pano macio em ambiente limpo.



7. Monte o copo de medicação e guarde em uma embalagem seca.

Atenção: limpe o gabinete do compressor com pano macio e umedecido com água ou detergente neutro. Não use produtos de limpeza abrasivos.

## Componentes

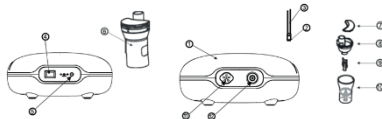

Componentes

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Compressor (unidade principal) | 7. Tapa do copo de medicação             |
| 2. Saída de ar                    | 8. Concha superior do copo de medicação  |
| 3. Tubo de ar                     | 9. Nebulizador                           |
| 4. Botão Liga/Desliga             | 10. Concha inferior do copo de medicação |
| 5. Conexão DC                     | 11. Filtro de ar e tampa                 |
| 6. Copo de medicação              | 12. Conector do tubo de ar               |

## COMPRESSOR NEBULIZADOR

| <b>Antes do Uso do Produto</b>                      |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Segurança                                           | 4  |
| Introdução                                          | 5  |
| Conteúdo                                            | 6  |
| Componentes                                         | 7  |
| <b>Montagem</b>                                     |    |
| Fonte de Energia                                    | 8  |
| Adição de Medicação                                 | 8  |
| Montagem do Copo de Medicação                       | 9  |
| Montagem do Tubo de Ar                              | 10 |
| <b>Operação da Unidade</b>                          |    |
| Uso da Unidade                                      | 11 |
| <b>Limpeza, Desinfecção e Manutenção da Unidade</b> |    |
| Limpeza Após a Inalação                             | 13 |
| Desinfecção                                         | 15 |
| Manutenção                                          | 16 |
| <b>Solução de Problemas</b>                         |    |
| Solução de Problemas                                | 17 |
| Especificações                                      | 18 |

Este produto é um equipamento médico. Siga orientações médicas e utilize o equipamento corretamente. Siga orientações médicas sobre o tipo, dosagem e posologia da medicação.

As características de nebulização desta unidade diferem nas propriedades da medicação. A taxa de nebulização pode ser reduzida, em especial com a utilização de medicação com alta atividade na superfície ou viscosidade, como agentes de solubilização de medicação ou expectorantes. A taxa de nebulização também pode ser reduzida quando a temperatura da medicação estiver baixa.

## ENSAIOS ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017

| Norma                       | Item Testado                                                            | Resultado |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABNT NBR IEC/CISPR 11:2012  | Emissão conduzida                                                       | Aprovado  |
| ABNT NBR IEC/CISPR 11:2012  | Emissão radiada                                                         | Aprovado  |
| IEC 61000-3-2:2009          | Emissões de harmônicos de corrente                                      | Aprovado  |
| IEC 61000-3-3:2013          | Flutuações de tensão e cintilação                                       | Aprovado  |
| ABNT NBR IEC 61000-4-2:2013 | Descarga eletrostática                                                  | Aprovado  |
| ABNT NBR IEC 61000-4-3:2014 | Imunidade de RF irradiada                                               | Aprovado  |
| ABNT NBR IEC 61000-4-3:2014 | Equipamento de comunicação sem fio RF                                   | Aprovado  |
| ABNT NBR IEC 61000-4-4:2015 | Imunidade à transiente elétrico rápido                                  | Aprovado  |
| IEC 61000-4-5:2005          | Imunidade à surtos                                                      | Aprovado  |
| IEC 61000-4-6:2013          | Imunidade à perturbações conduzidas, induzidas por campos de RF         | Aprovado  |
| IEC 61000-4-8:2009          | Magnética de Frequência de Potência                                     | Aprovado  |
| IEC 61000-4-11:2004         | Imunidade à quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão | Aprovado  |

## Conteúdo da Embalagem (Verifique o produto)

Os itens a seguir são o conteúdo da embalagem. Se faltar algum item, entre em contato com o estabelecimento no qual o produto foi adquirido ou o distribuidor autorizado.

1.Compressor  
(Unidade Principal)



2.Copo de Medicação



3.Máscara de  
Inalação (adulto)



4.Máscara de  
Inalação (infantil)



5.Bocal



6.Tubo de Ar



7.Filtro de Ar



8.Adaptador DC



**Para iniciar a inalação, é necessário montar o equipamento.**

Leia as páginas 7, 8 e 9 sobre as instruções de montagem do equipamento antes do uso.

(Consulte as páginas 7, 8 e 9.)

## Desinfecção

Desinfete o copo de medicação e o bocal ou acessório nasal após a última inalação do dia.

- Como desinfetar:



Para a desinfecção das máscaras, use um desinfetante comercialmente disponível e siga as instruções do fabricante do produto.

- Submerja as peças em um recipiente com a solução desinfetante pelo período especificado.
- Retire as peças e descarte a solução desinfetante.
- Enxague as peças em água corrente, agite as peças para retirar o excesso de água e seque as peças em um ambiente limpo.



- Nunca seque as peças em fornos de micro-ondas.
- Nunca use autoclaves, desinfecção por gás de óxido de etileno (EOG) ou esterilizadores plasma a baixas temperaturas.

# Montagem

## 4. Tubo de Ar

1. Gire o plugue do tubo de ar e empurre-o firmemente ao conector do tubo de ar do compressor.



Atenção: mantenha o copo de medicação na posição vertical ao montar o tubo de ar para evitar derramamento de medicação.

Atenção: NÃO utilize o aparelho se o tubo de ar estiver dobrado ou amassado.

2. Gire o plugue do tubo de ar suavemente e empurre-o firmemente para a base do copo de medicação.

Use a base do copo de medicação como um suporte temporário.

# Uso da Unidade

## 1. Copo de Medicação




Postura correta



Atenção: NÃO incline o copo de medicação em ângulo maior que 45°. O líquido poderá escorrer pela boca.

## 2. Ligar a Unidade

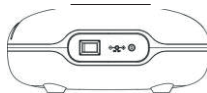

Pressione o botão "Liga/Desliga" por 0,5 segundo. Ao ligar o compressor, a nebulização é iniciada.

# Segurança

Leia as notas de segurança antes do uso do equipamento

Os símbolos de advertência e os ícones são indicados para o uso seguro e correto do equipamento, além de evitar riscos e danos pessoais. Os ícones e significados são apresentados a seguir.

## Cuidado

- Não aspire água do copo de medicação.
- Não derrame água ou outros líquidos no compressor e no plugue de energia. Estas peças não são resistentes à água. Se forem derramados líquidos nestas peças, desconecte o plugue de energia imediatamente e seque as peças com gaze ou outro material absorvente macio.
- Não derrube ou permita impactos fortes ao compressor ou copo de medicação.
- Não desmonte, conserte ou modifique o equipamento.
- Ao usar o equipamento em crianças ou indivíduos com incapacidades, ou ainda com crianças ou indivíduos com incapacidades nas proximidades, supervisione atentamente a operação.
- Se o equipamento for utilizado continuamente, sua vida útil será reduzida.
- Limite o uso em 30 minutos por vez e faça um intervalo de 20 minutos antes do próximo uso.
- Não insira nenhum objeto dentro do compressor.
- Mantenha o filtro de ar limpo. Se o filtro de ar mudar de cor ou for utilizado por mais de 60 dias, substitua-o por um novo filtro.
- Efetue a montagem correta do copo de medicação, a instalação adequada do filtro de ar e a conexão correta do tubo de ar ao compressor e ao copo de medicação. Se o tubo de ar não estiver conectado corretamente, poderá ocorrer vazamento de ar.
- Não use o equipamento se o tubo de ar estiver dobrado.
- Não adicione mais de 8ml de líquido no copo de medicação.
- Não utilize o equipamento sob temperaturas maiores que 40 °C (104 °F).
- Não incline o copo de medicação de forma que o ângulo do componente seja maior que 45°. A medicação poderá escorrer para a boca.
- Não agite o copo de medicação durante o uso do equipamento.
- Adquirir somente peças e acessórios genuínos. Peças e acessórios não aprovados para utilização neste equipamento poderão danificar o produto e apresentar desempenho abaixo da especificação indicada.
- Para evitar danos à mucosa nasal, não aperte o acessório nasal nas narinas.
- Ao utilizar este equipamento, haverá certas vibrações e ruídos causados pela bomba no compressor.
- Também haverá ruídos causados pela emissão de ar comprimido do copo de medicação. Isto é normal e não representa mau funcionamento.
- Ao esterilizar as peças em fervura, não deixe a água fervente secar completamente no recipiente ao fogo.
- Não utilize o equipamento ao dormir ou durante o sono.
- Após o uso, remova o plugue de energia do equipamento.
- Desconecte o plugue de energia da rede elétrica antes de efetuar a limpeza do equipamento.
- Não deixe resíduos líquidos no copo de medicação após o uso.
- Não guarde o tubo de ar contendo resíduos de líquidos ou umidade. Isto poderá causar infecções por bactérias.
- Não enrolar o cabo de energia no compressor (unidade principal).
- A manutenção não deve ser efetuada por pessoas não capacitadas com o devido treinamento e habilidades específicas.

# Solução de Problemas

| Problema                                                                  | Causa Possível                                                                                             | Correção                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não liga ao pressionar o botão.                                | O adaptador DC não está conectado a unidade principal.                                                     | Conecte o adaptador DC no compartimento e pressione o botão de energia.                                    |
| Não há nebulização ou há baixa taxa de nebulização com o aparelho ligado. | Não há líquido no copo de medicação. Há excesso ou falta de líquido no copo de medicação.                  | Adicione a quantidade correta de medicação prescrita no copo de medicação.                                 |
|                                                                           | O regulador não está encaixado na concha superior do copo de medicação ou está posicionado incorretamente. | Encaixe o regulador corretamente na concha superior do copo de medicação.                                  |
|                                                                           | O copo de medicação não está montado corretamente.                                                         | Monte o copo de medicação corretamente e encaixe o acessório de inalação corretamente.                     |
|                                                                           | O pulverizador está bloqueado.                                                                             | Limpe e desinfete o copo de medicação para desobstruir o bloqueio.                                         |
|                                                                           | O copo de medicação está inclinado a um ângulo incorreto.                                                  | Segure corretamente o copo de medicação. Não incline o copo de medicação a um ângulo maior que 45°.        |
|                                                                           | O tubo de ar está encaixado incorretamente.                                                                | Encaixe corretamente o tubo de ar ao compressor e ao copo de medicação.                                    |
|                                                                           | O tubo de ar está dobrado ou danificado. O tubo de ar está bloqueado.                                      | Não dobre, amasse ou torça o tubo de ar. Verifique danos no tubo de ar. Substitua-o se estiver danificado. |
| O equipamento está muito quente.                                          | O filtro de ar está sujo.                                                                                  | Substitua o filtro de ar por um novo filtro de ar limpo.                                                   |
|                                                                           | O compressor está coberto.                                                                                 | Não cubra o compressor com nenhum tipo de cobertura durante o uso.                                         |
|                                                                           | Operação contínua por mais de 30 minutos.                                                                  | Limite o uso a 30 minutos por vez e faça um intervalo de 20 minutos antes de usar o equipamento novamente. |
| O aparelho emite ruído anormal.                                           | O tubo de ar está encaixado incorretamente.                                                                | Encaixe a tampa do filtro de ar corretamente. Não bloqueie a tampa do filtro de ar.                        |

**Nota:** se o equipamento não funcionar normalmente após adotar os procedimentos descritos acima, entre em contato com o distribuidor ou o serviço de assistência técnica local.



Limpe o bocal, acessório nasal, máscara e filtro de ar antes do uso.

## 1. Fonte de Energia

Conecte o adaptador DC ao compartimento na Unidade Principal e o plugue na tomada de rede elétrica conforme indicado na figura.

Não utilize o equipamento com mãos molhadas!



## 2. Adição de Medicação

Eleve o bocal, acessório nasal ou máscara do copo de medicação e desrosqueie a concha superior do copo de medicação.



Atenção: evite impactos ao nebulizador no solo. O nebulizador é fixado na concha superior por dois ganchos e pode ser retirado com pouca força.



Adicione a quantidade correta de medicação prescrita na concha inferior do copo de medicação.



## 5. Desconecte o Tubo de Ar do Copo de Medicação

- Segure o plugue do tubo de ar e puxe suavemente.
- Verifique se não há condensação ou resíduos de umidade no tubo de ar.

Se houver resíduos de condensação ou umidade no tubo de ar, faça a remoção completa. Siga as orientações abaixo:

1. Mantenha o tubo de ar conectado ao compressor.
2. Ligue o aparelho. O compressor começará a bombear ar pelo tubo para expelir a umidade.
3. Desligue o aparelho.

## 6. Desconecte o tubo de ar do compressor

- Segure o plugue do tubo de ar e puxe-o suavemente do conector na parte superior do compressor.

## 7. Desconecte o Adaptador DC da Tomada da Rede Elétrica (versão com adaptador)

- Desconecte o Adaptador DC da tomada da rede elétrica e do compressor.

