

techline®

BALANÇA SMART DE
BIOIMPEDANCIA **TEC-BF01**



TEC-BF-01.2024

Manual de Instruções

Balança com Bluetooth

Obrigado por adquirir a Balança Inteligente! Esta balança é sua assistente pessoal de saúde. A balança utiliza a tecnologia de Análise de Impedância Bioelétrica (AIB) para oferecer os dados necessários para acompanhamento de métricas de sua saúde: IMC (Índice de Massa Corporal), % de gordura corporal, água corporal, massa muscular, massa óssea, proteína e muito mais! Desejamos que você tenha uma ótima experiência com o uso deste novo produto.

Atenção

Precauções de Segurança:

Ao utilizar uma balança digital, certas precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo:

1. A balança Bluetooth não deve ser utilizada para diagnosticar ou tratar doenças. Consulte um médico ao iniciar uma dieta ou programa de exercícios físicos.
2. Gestantes, portadores de marcapasso ou outro dispositivo interno não devem confiar nos dados fornecidos por este produto. Todos os dados são apenas para referência e não substituem orientação médica profissional.
3. Em caso de mau funcionamento, verifique as pilhas e efetue a substituição se necessário.
4. Verifique o dispositivo antes de cada uso. Não use este produto se estiver danificado. O uso contínuo de um produto danificado poderá causar lesões e resultados imprecisos.

Nota:

1. A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca

pule, cause impactos ou desmonte a balança. Manuseie este produto com cuidado para evitar danos.

2. Posicione a balança em uma superfície rígida e plana durante o uso. Superfícies macias como carpetes ou linóleo podem afetar a precisão das leituras da balança.

3. Para assegurar sua precisão, suba na balança calmamente para ativá-la. Espere ao menos 10 segundos para iniciar a pesagem. A balança também deve ser ativada se for movida para outro local.

Efetue medições no mesmo horário diário para assegurar resultados mais precisos.

4. Retire as pilhas quando a balança não for utilizada. Guarde a balança em local seco e protegido contra umidade, calor, fiapos, poeira e luz direta do sol. Nunca coloque objetos pesados sobre este equipamento.

5. Antes do uso da balança, verifique se todos seus dados pessoais estão inseridos no app Fitdays.

6. Use a balança com pés descalços. A balança não mede a gordura corporal se você estiver usando calçados ou meias.

7. Mantenha os pés secos antes da pesagem.

8. Esta balança não é resistente à água. Nunca submerja a balança em água. Para limpeza da superfície, use um pano macio umedecido ou um produto limpa-vidros. Não use detergentes ou outros produtos químicos.

Balança com Bluetooth

Dimensões: 10,2 x 10,2 x 0,94 polegadas / 26 x 26 x 2,4cm

Peso: 1,26kg / 2,77lb - Pilhas: 2*1.5 V AAA

Capacidade: 396 lb / 180 kg

Divisão: 50g/100g (>100kg) / 0,1lb

Unidade de pesagem: lb / kg

Faixa de Precisão

50kg:±0.3kg	100kg:±0.4kg	180kg:±0.5kg
110lb:±0.66lb	220lb:±0.88lb	396lb:±1.1lb

Solução de Problemas

8888

Funções normais

No display

Trocar pilhas

[

Calibração

Lo

Trocar pilhas
battery


Err

Sobrecarga

Peso corporal: posicione a balança em uma superfície plana e aguarde ao menos 10 segundos para subir na balança. O visor exibirá 0.00 kg antes da subida na balança.

Sequência do Visor

Não suba na balança com o visor em operação, que indica a medição em andamento. Aguarde até concluir a medição. O visor exibirá os resultados. Acima dos resultados, serão incluídos peso corporal, taxa de gordura corporal e o IMC, sendo cada dado exibido por 3 segundos.

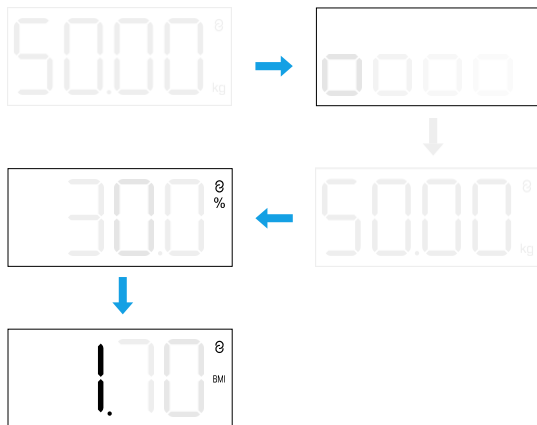



Gordura corporal e outras análises de composição corporal: permaneça na balança na posição reta e toque os eletrodos uniformemente com pés descalços e secos conforme as imagens abaixo:



Áreas condutivas


Instruções de Operação

A Balança Bluetooth se conecta com seu dispositivo (Android 6.0+ e iOS 8.0+) ou iPad via Bluetooth 4.0. Baixe gratuitamente o app Fitdays na App Store ou Google Play.


Baixe o App e Instale as Pilhas



Baixe o **Fitdays** na Apple Store ou Google Play.

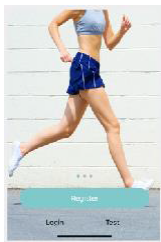


Registre sua ID.
Adicione seus dados e confirme OK.

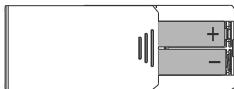


Instale as pilhas. As pilhas incluídas são versão de teste. Recomendamos substituí-las em 3 meses e retirá-las quando não utilizar a balança.

Pareamento da Balança com seu Dispositivo


Ative o Bluetooth em seu dispositivo. No sistema Android 6.0 ou mais, ative também a localização.

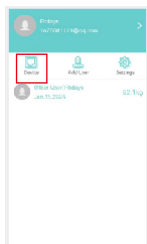

Toque [Device] e Device Management para acessar a seção de medição e o dispositivo.

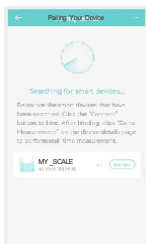

Ligue a balança e toque [+]. Selecione "MY_SCALE" e adicione o dispositivo.



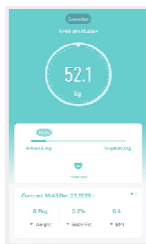


Volte à seção de medição. Suba na balança por 5-10 segundos com pés descalços. A pesagem é concluída após a exibição dos dados.



Relatórios, dados excluídos, compartilhamento de dados, progresso recente semanal, mensal e anual.

Clique em “Charts” para visualizar o histórico. Acesse “Click to view all data” no calendário para consultar dados históricos e selecionar conjuntos de dados ou todos os dados que deseja excluir.

Selecione  e  para compartilhar dados no Facebook, Instagram ou SMS.

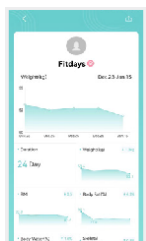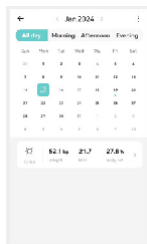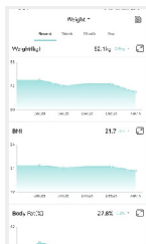




Na parte inferior, há uma barra para seleção de diferentes tipos de dados para exibição. Compartilhe seus dados fitness com seus amigos no Facebook, Instagram ou SMS clicando na tecla de compartilhamento na seção de medição.

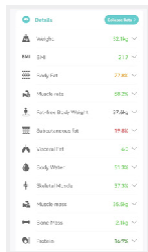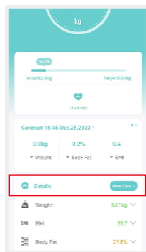

Adição/Exclusão de Usuários e Ajustes Básicos

Em “Account”, adicione usuário(s) “👤”. Para excluir uma conta, deslize a conta para a esquerda e selecione “Delete”.


Temas, objetivos, unidades de pesagem, sons de pesagem concluída, idiomas e senha são configurados na seção “⚙️”. Altere a unidade de pesagem em “Press the Unit” para controle da unidade de pesagem no app.

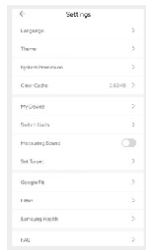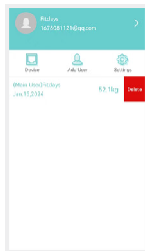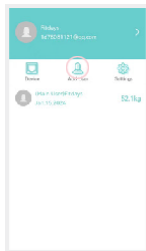

Sincronização com o App Fitness

Apple Health


- 1) Abra o app “Health” em seu iPhone. Selecione “Data Sources”.
- 2) Selecione **Fitdays** na lista.
- 3) Ative todas as categorias para habilitar o app **Fitdays**.

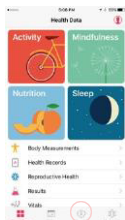

1




2

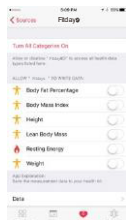

3

Google Fit


- 1) Acesse “” e selecione “Google Fit”.
- 2) Toque a tecla “Google Fit”. Acesse sua conta do Google.
- 3) Você será automaticamente redirecionado para o “Google Fit”.
- 4) Após a conexão, o peso (Weight) fará a sincronização com o Google Fit.

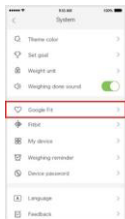

1



2-1

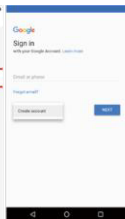

2-2




3




4

App **Fitbit**

- 1) Acesse “” e selecione **Fitbit**.
- 2) Clique na tecla Fitbit e efetue seu login.
- 3) Selecione “Allow” para acessar o app **Fitbit**.
- 4) Após a conexão, os dados (peso, %de gordura corporal e IMC) serão sincronizados com o app **Fitbit**. Visualize os dados no app ou na web.

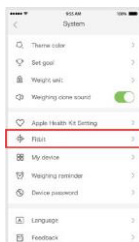

1

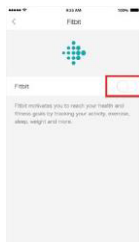


2-1



2-2



3

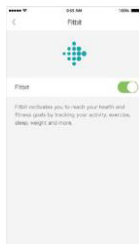

4-1





4-2

Manutenção

Recalibração da balança

Se for movida para outro local ou virada ao contrário, a balança deverá ser recalibrada para assegurar resultados precisos.

1. Posicione a balança em uma superfície rígida e plana.
2. Suba na balança com um pé até que os dígitos sejam exibidos no visor. Desça da balança.
3. A balança exibirá “0.00”, indicando que o processo de calibração está concluído.

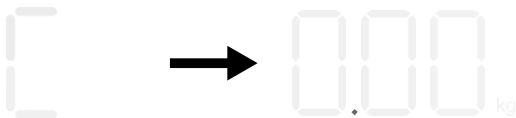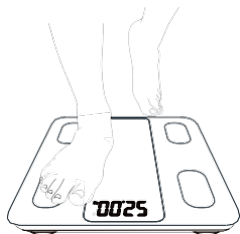

Perguntas Frequentes & Respostas

1. Por que a balança não funciona? Por que os dados no visor desaparecem rápido?

- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente. Efetue a substituição se necessário.

2. A balança não se conecta com o app.

- Verifique se o software de seu dispositivo é iOS 8.0 / Android 6.0 ou mais recente.

- Baixe e abra a versão mais recente do app ***Fitdays***.

- Habilite o Bluetooth em seu dispositivo. Em dispositivos Android 6.0 ou mais recente, habilite a localização.

3. Não há medição da gordura corporal na pesagem.

- Suba na balança com pés descalços e secos.

- Verifique se o Bluetooth está habilitado e ativado.

- Verifique se seus dados pessoais foram inseridos.

Declaração FCC

A operação do equipamento está sujeita a duas condições:

- (1) Este produto não deve causar interferência prejudicial.
- (2) Este produto deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que cause funcionamento indesejado.

Nota: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B previstos na Regulamentação FCCF, Parte 15. Estes limites são designados para prover proteção razoável contra interferência prejudicial em instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se este equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, sua utilização poderá causar interferência prejudicial em radiocomunicações. Contudo, não há garantia de que isto não ocorrerá em alguma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento novamente, o usuário pode tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento em uma saída de um circuito diferente do qual o receptor está conectado;
- Consultar o distribuidor ou um técnico profissional de rádio e TV para assistência.

Garantia

1. Este produto está garantido pelo período de cinco anos a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL, onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar o cupom fiscal. A falta do cupom fiscal extingue automaticamente a garantia.
2. Só estão cobertos pela garantia defeitos de fabricação. Defeitos provocados mesmo que não intencionalmente, não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia só cobre o funcionamento do aparelho, excluindo-se a braçadeira que, por ser uma peça delicada, se manuseada indevidamente, poderá estourar, furar etc.
4. Não estão cobertos pela garantia defeitos provocados por queda do aparelho, umidade, água, vazamento das pilhas, as próprias pilhas que vêm no aparelho (somente para teste) e a braçadeira. Não estão cobertos ainda consertos executados por pessoa não autorizada pelo fabricante, violação e abertura do aparelho pelo próprio consumidor ou por pessoa não autorizada pelo fabricante ou falta da apresentação do cupom fiscal de compra.
5. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para verificação, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.
6. A garantia é válida somente nos países onde o aparelho é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado oficialmente pelo fabricante.
7. A garantia é válida somente ao primeiro consumidor e ela é intransferível, sendo nula qualquer outra condição.
8. O fabricante se obriga a consertar o produto no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
9. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.
10. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo de garantia.
11. Após o prazo de garantia o fabricante se obriga a manter peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo usuário.
12. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças pelo uso indevido, mesmo que o aparelho esteja dentro do período de garantia, será cobrado à parte.
13. A verificação periódica do aparelho não está coberta pela garantia.
14. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas ao território nacional (Brasil).
15. Perde a garantia o aparelho que for usado indevidamente, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, umidade etc. Defeitos ou danos causados por uso inadequado estão excluídos desta garantia.
16. A assistência técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para verificação via Correio. O Sedex de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho pela mesma via com frete pago pela Techline.

MODELO: TEC-BF01 MARCA: TECHLINE

1 ANOS DE GARANTIA

IMPORTADO POR: TECHLINE COM. IMP. EXP. SERV. LTDA.

END.: AV CIVIT I, 1295, GALPÃO B, SETOR C2 - BARRO BRANCO,

SERRA - ES - CEP 29170-740

CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 CNPJ FILIAL: 64.132.434/0007-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALDEMAR ALBERT SARACENI

CREA/SP: 5060960387/D

ANATEL: 10255-24-13860

PAÍS DE ORIGEM: CHINA

techline®



Cidade de São Paulo: 11 3478-1620
Outras localidades: 0800 555 7510