


techline®


BALANÇA INTELIGENTE DE
BIOIMPEDÂNCIA CORPORAL TOTAL
TEC-119

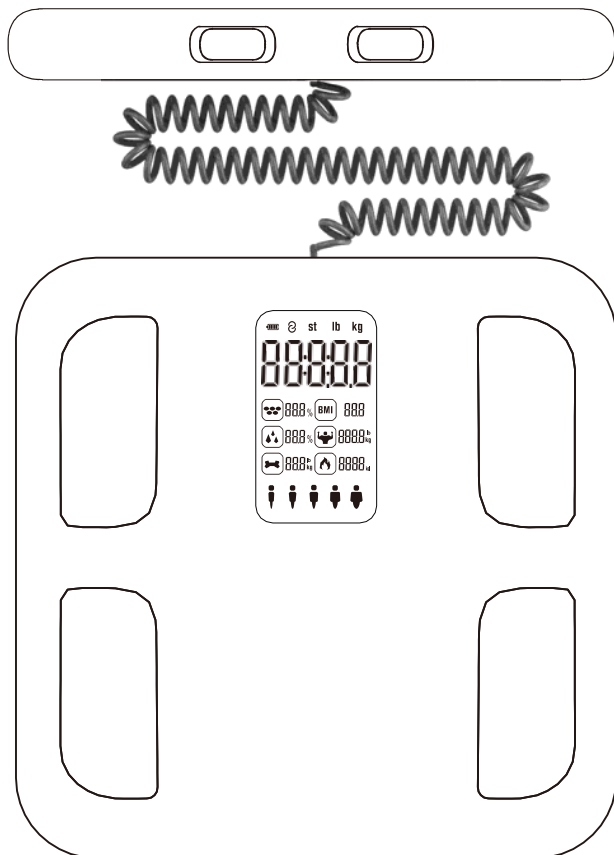


Manual de Instruções

Guia de Início Rápido


1. Baixe o app **Fitdays** na Apple Store ou Google Play.
2. Ligue a balança com a tecla próxima ao conector USB.
3. Coloque a balança em uma superfície rígida e plana.
4. Efetue a medição com os pés descalços em contato total com os eletrodos.
5. Acesse o app e conecte a balança antes da medição.
6. Siga as instruções abaixo e mantenha a postura correta para a medição.

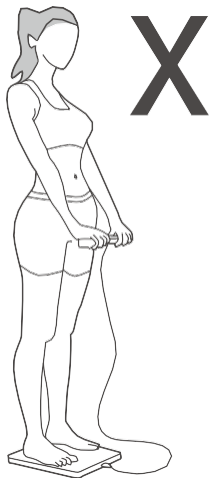


Braço para baixo

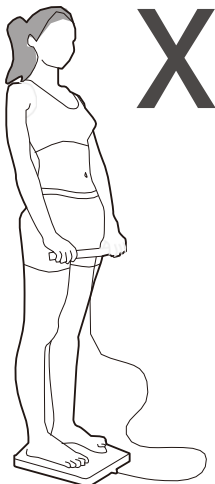


Braços na cintura

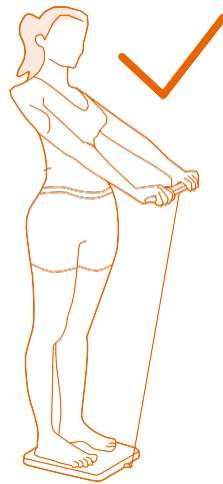

Braços retos a 45° ou 90°

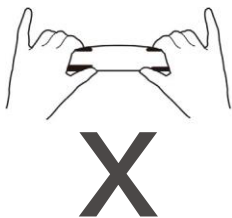

O dedo mínimo não toca os eletrodos de aderência

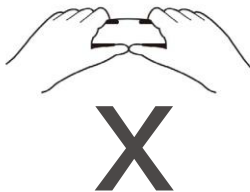

Polegares juntos encostados



Todos os dedos tocam os eletrodos de aderência

Balança Inteligente de Bioimpedância Corporal Total

Obrigado por adquirir a Balança Inteligente de Bioimpedância Corporal Total. Esta balança utiliza a tecnologia de Análise de Impedância Bioelétrica (AIB) para medição adequada de peso corporal, IMC, taxa de gordura corporal, gordura visceral, água corporal, músculo esquelético, massa muscular, massa óssea, proteína, taxa metabólica basal, idade corporal etc.

ATENÇÃO!

- NÃO use este produto com implantes médicos, como marcapassos;
- NÃO se posicione nas bordas da balança e NÃO pule na balança;
- NÃO sobrecarregue a balança (Máx.180kg/440lb/28st);
- NÃO derrube a balança ou objetos na balança. Isto poderá danificar os sensores;
- NÃO submerja a balança em água e NÃO use produtos químicos para limpeza. Limpe a balança com um pano macio umedecido;
- Não é recomendado o uso deste produto por gestantes;
- Não é recomendado o uso deste produto por bebês e crianças menores de 10 anos de idade. *
- As medições obtidas neste produto são apenas para referência e não devem ser consideradas como opiniões médicas;
- NÃO use este produto para diagnosticar ou tratar condições de saúde. Consulte um médico antes de promover alterações em dietas, plano de exercícios ou atividades físicas;
- Sempre mantenha a balança em uma superfície rígida, plana e seca antes de medições;
- Mantenha os pés secos antes de subir na balança;
- Conecte as pilhas de acordo com as polaridades corretas indicadas;
- Retire as pilhas se a balança não for utilizada por longos períodos;
- NÃO use este produto se estiver danificado. O uso contínuo do produto danificado pode causar lesões ou resultados inadequados. Verifique o produto antes de cada uso;
- Se ocorrer mau funcionamento, verifique as pilhas e, se necessário, efetue a substituição;
- Tenha cuidado ao utilizar a balança em superfícies molhadas e escorregadias.

Especificações do Produto

Dimensões:	300 x 300 x 26mm
Visor (LCD):	107 x 62mm
Unidades de medida de peso:	Kg/lb/st
Limite de peso:	6kg-180kg
Divisão de peso:	0,1kg/0,2lb
Alimentação:	Célula de lítio recarregável (porta USB)
Temperatura de operação:	10-40 °C
Umidade operacional:	40%-80% UR

Símbolos Indicadores



Pilhas fracas. Insira pilhas novas (carregue a balança com cabo Tipo-C).




Peso maior que 180kg. A balança está sobrecarregada.



Erro de medição. Desça da balança, aguarde 5 segundos e suba na balança para efetuar nova medição.

Visão Geral do Produto

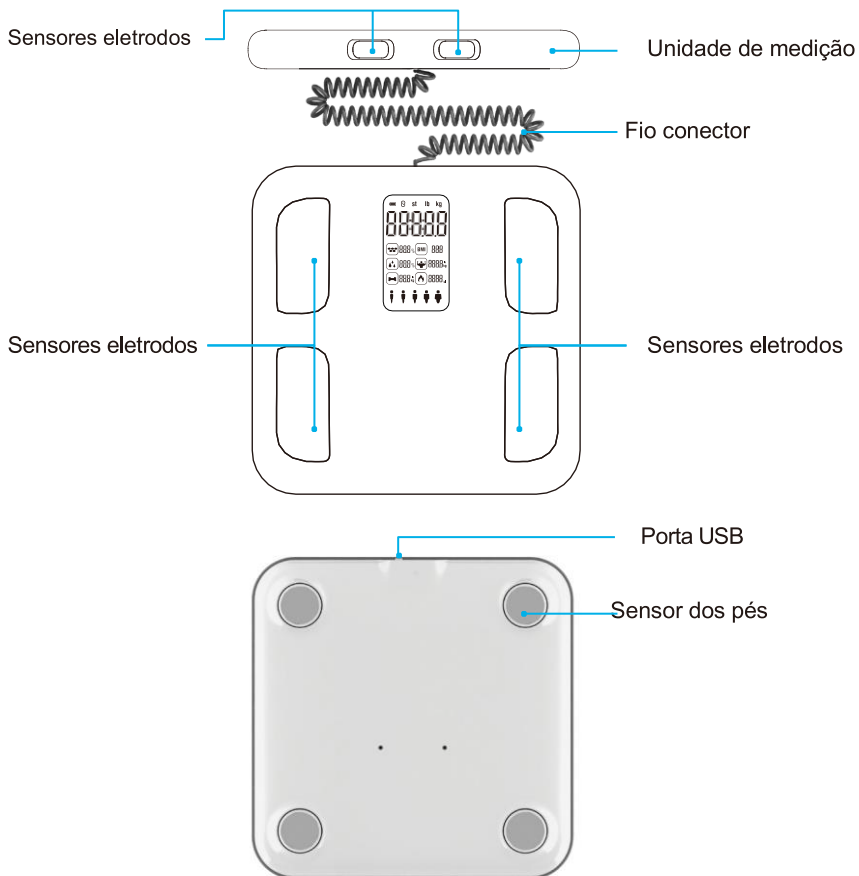

Símbolos Indicadores

iOS: 8.0 ou mais

Android: 5.0 ou mais

Instalação do App *Fitdays*

1. Baixe o app por meio do QR Code abaixo ou busque **Fitdays** na Apple Store ou Google Play.



2. Baixe e instale o app **Fitdays** em seu dispositivo;



3. O ícone do app será exibido em seu fone ou tablet após concluída a instalação.

Como utilizar a balança com o app *Fitdays* pela primeira vez?

1. Acesse o app **Fitdays** em seu dispositivo;


2. Registre sua conta de email ou efetue o login com sua conta de redes sociais;

3. Adicione seus dados pessoais e confirme.

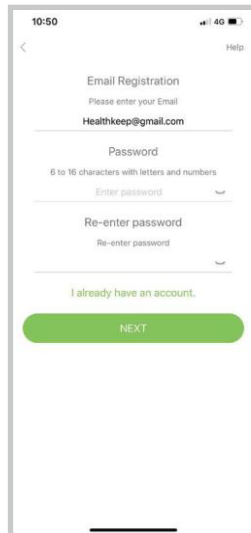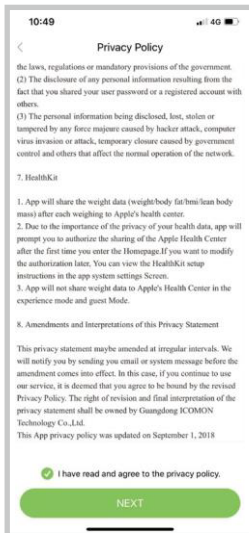


4.iOS: ative e autorize o Bluetooth;

5.Android: ative o Bluetooth e permita o GPS e a localização.

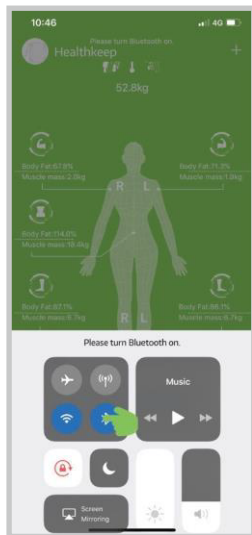


iOS

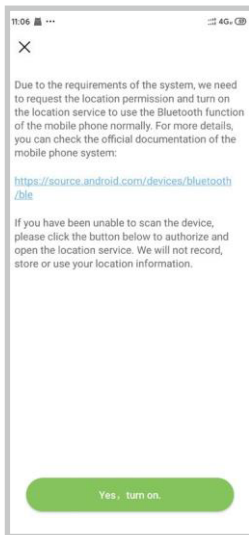

Android

6.Retire a folha isolante da parte traseira da balança e a coloque em uma superfície rígida e plana. Suba na balança com um pé para ativá-la. Aguarde até o visor exibir “0.0kg”.

7.Efetue o pareamento por meio do Bluetooth. A balança deve estar ligada. Com o app ativado e em sua tela principal, a conexão será automática com a balança. Ou, clique em “Account” --> “Dispositivo”--> “+”> “Bluetooth” encontre a ID da balança: My_scale.

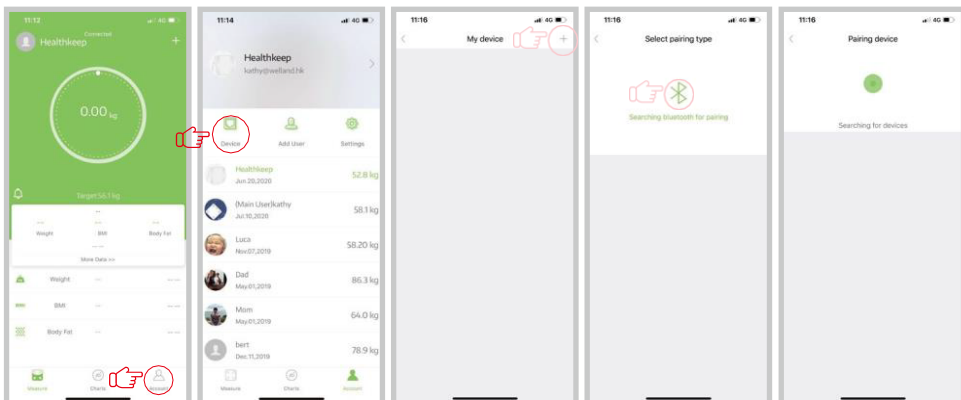

8.O app exibirá seus dados em alguns segundos.

Conexão Bluetooth

1) Conexão Comum

Consulte o capítulo “Como utilizar a balança com o app **Fitdays** pela primeira vez?”

2) Se a conexão comum ao Bluetooth falhar, siga as etapas abaixo:

- Reinicie a balança: desligue e aguarde 5 segundos para ligá-la novamente;
- Reinicie a conexão por Bluetooth. Habilite o Bluetooth e o GPS (somente Android) em seu dispositivo;
- Na seção “Account”, selecione “Device”. Deslize para a esquerda para excluir o dispositivo atual;
- Clique “+” no canto superior direito para acessar o modo de pareamento;
- Suba na balança com apenas um pé para ativá-la;
- Após alguns segundos de inicialização, o nome da balança será exibido. Clique e confirme;
- Suba na balança novamente para concluir o pareamento.

Solução de Problemas

1. Falha na conexão por Bluetooth:

- Verifique se a balança, o Bluetooth e o GPS em seu dispositivo (somente Android) estão ligados;
- Consulte a versão do sistema em seu dispositivo. A versão mínima é iOS 8.0/Android 5.0;
- Ao concluir a conexão, o ícone do Bluetooth será exibido com a palavra “Connected” no círculo das configurações de conexão do dispositivo;
- Se a conexão por Bluetooth falhar, clique em Account—>Device para encontrar a ID da balança: My_scale.

2. Não há exibição de dados de gordura corporal após a pesagem:

- Suba na balança com pés descalços;
- A balança e seus pés devem estar secos;
- Desça da balança se a medição não for concluída (permaneça na balança por cerca de 10 segundos até que o número no visor pare de piscar);
- O Bluetooth não está ativado;
- O Bluetooth está pareado com outra balança diferente.

3. Dados incorretos de pesagem:

- Verifique se a balança está adequadamente posicionada em uma superfície rígida, plana e seca;
- Verifique se não há obstruções entre os pés e os sensores da balança.

4. Relação músculo-gordura incorreta exibida no app:

- As configurações dos parâmetros do corpo estão incorretas. Consulte os dados de gênero, altura e idade estão corretos;
- Verifique se você ativou o Modo Atleta (Athlete Mode).

5. Como recalibrar a balança após a medição?

- Suba na balança para ativá-la. Deixe que baixe automaticamente para 0.0kg para calibrar.

6. A balança não liga:

- Verifique se a tecla na balança está acionada;
- Verifique a bateria. Efetue o carregamento com o cabo Tipo-C adequado.

Perguntas Frequentes & Respostas

1.Como obter o melhor resultado?

- Posicione-se firmemente na balança. Não se mova durante a medição;
- Efetue sua medição no mesmo horário diário para obter resultados mais precisos;
- Coloque a balança em uma superfície rígida, plana e seca. Suba na balança com pés descalços. Em seguida o visor será acionado;
- Verifique as informações de seu perfil (gênero, idade e altura). Confirme se os dados estão corretos;
- Verifique o local da balança. Confirme se a superfície é plana e rígida. Alguns locais parecem planos, mas não são. Posicione a balança em diferentes superfícies planas e rígidas até obter o mesmo resultado;
- Verifique a base da balança antes de efetuar medições. Se não estiver equilibrada, os dados não serão precisos;
- Verifique se “0.0” é exibido no visor antes de cada uso;
- Mantenha os pés descalços. Cada pé deve tocar o eletrodo superior e inferior.

2.Como reiniciar a balança?

- Primeiramente, desligue a balança com a tecla próxima da porta USB;
- Em seguida, ligue a balança novamente;
- Após o reinício automático, suba na balança.

3.Como alterar o idioma?

- No app Fitdays--->Account--->Settings--->Language

4.Como alterar a unidade?

- No app Fitdays--->Account--->Settings--->Switch units

Para mais informações, consulte a seção FQA no app Fitdays: “Account >Settings >FAQ”

Recomendações:



Mantenha a balança fora do alcance de crianças para evitar quedas e impactos.



Não exponha a balança ao fogo ou calor extremo. Isto poderá causar explosões.




Produtos elétricos não devem ser descartados com lixo doméstico. Efetue o descarte em locais determinados pelas regulamentações locais.


Consulte as autoridades locais ou o distribuidor sobre orientações de descarte.

Instalação do Suporte

1. Retire a película adesiva do suporte incluso e cole na parede considerando o comprimento do cordão.

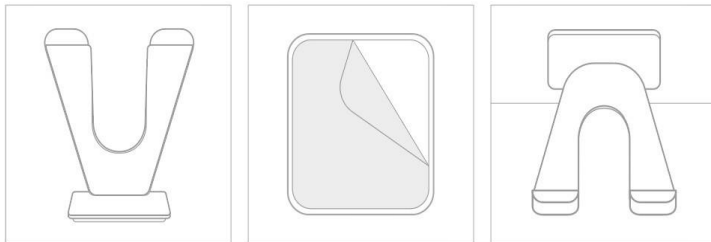

2. Coloque a peça no suporte quando não estiver em uso.

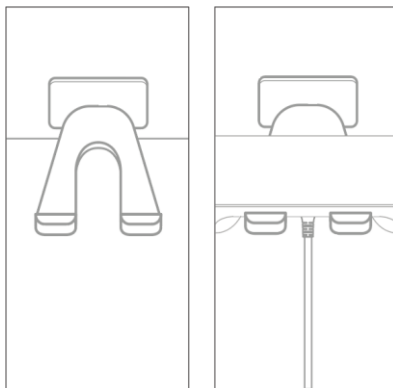

Perguntas Frequentes & Respostas

1. Por que a balança não funciona? Por que os dados no visor desaparecem rápido?

- Verifique a energia e se as pilhas estão instaladas corretamente.

Efetue a substituição se necessário.

2. A balança não se conecta com o app.

- Verifique se o software de seu dispositivo é iOS 8.0 / Android 6.0 ou mais recente.

- Baixe e abra a versão mais recente do app Starfit.

- Habilite o Bluetooth em seu dispositivo. Em dispositivos Android 6.0 ou mais recente, habilite a localização.

3. Não há medição da gordura corporal na pesagem.

- Suba na balança com pés descalços e secos.

- Habilite e ative o Bluetooth em seu dispositivo.

- Verifique se seus dados pessoais foram inseridos.

Nota de Advertência

Mudanças ou modificações no produto não autorizadas expressamente pelo fabricante poderão impossibilitar a autoridade do usuário na operação do equipamento.

Declaração FCC

A operação do equipamento está sujeita a duas condições:

(1) Este produto não deve causar interferência prejudicial.

(2) Este produto deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que cause funcionamento indesejado.

Nota: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B previstos na Regulamentação FCCF, Parte 15. Estes limites são designados para prover proteção razoável contra interferência prejudicial em instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se este equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, sua utilização poderá causar interferência prejudicial em radiocomunicações. Contudo, não há garantia de que isto não ocorrerá em alguma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento novamente, o usuário pode tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento em uma saída de um circuito diferente do qual o receptor está conectado;
- Consultar o distribuidor ou um técnico profissional de rádio e TV para assistência.

Garantia

1. Este produto está garantido pelo período de cinco anos a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL, onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar o cupom fiscal. A falta do cupom fiscal extingue automaticamente a garantia.
2. Só estão cobertos pela garantia defeitos de fabricação. Defeitos provocados mesmo que não intencionalmente, não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia só cobre o funcionamento do aparelho, excluindo-se a braçadeira que, por ser uma peça delicada, se manuseada indevidamente, poderá estourar, furar etc.
4. Não estão cobertos pela garantia defeitos provocados por queda do aparelho, umidade, água, vazamento das pilhas, as próprias pilhas que vêm no aparelho (somente para teste) e a braçadeira. Não estão cobertos ainda consertos executados por pessoa não autorizada pelo fabricante, violação e abertura do aparelho pelo próprio consumidor ou por pessoa não autorizada pelo fabricante ou falta da apresentação do cupom fiscal de compra.
5. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para verificação, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do produto e outras despesas aqui não especificadas.
6. A garantia é válida somente nos países onde o aparelho é oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor nomeado e autorizado oficialmente pelo fabricante.
7. A garantia é válida somente ao primeiro consumidor e ela é intransferível, sendo nula qualquer outra condição.
8. O fabricante se obriga a consertar o produto no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
9. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.
10. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo de garantia.
11. Após o prazo de garantia o fabricante se obriga a manter peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo usuário.
12. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças pelo uso indevido, mesmo que o aparelho esteja dentro do período de garantia, será cobrado à parte.
13. A verificação periódica do aparelho não está coberta pela garantia.
14. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas ao território nacional (Brasil).
15. Perde a garantia o aparelho que for usado indevidamente, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provocados por queda, umidade etc. Defeitos ou danos causados por uso inadequado estão excluídos desta garantia.
16. A assistência técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para verificação via Correio. O Sedex de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho pela mesma via com frete pago pela Techline.

MODELO: TEC-119 MARCA: TECHLINE - 1 ANO DE GARANTIA PARA O APARELHO
IMPORTADO POR: TECHLINE COM. IMP. EXP. SERV. LTDA.
END.: AV CIVIT I, 1295, GALPÃO B, SETOR C2 - BARRO BRANCO, SERRA - ES - CEP 29170-740
CNPJ MATRIZ: 64.132.434/0001-28 CNPJ FILIAL: 64.132.434/0007-13
AFE MATRIZ: 1.04.106-1 AFE FILIAL: 8.13.267-6 (35X32MHM94W7)
ANATEL: 09425-24-13860
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALDEMAR ALBERT SARACENI CREA/SP: 5060960387/D
PAÍS DE ORIGEM: CHINA

techline®



Cidade de São Paulo: 11 3478-1620
Outras localidades: 0800 555 7510

